

Park Avenue - Beryl 1
BP 24766
31047 TOULOUSE cédex 01
Tel. : 05 34 61 30 16

Affaire suivie par : Claudine SARRERE
Lettre recommandée avec AR

Objet : RAPPEL DE LOT

Toulouse, le 28 février 2007

Madame, Monsieur,

Un dysfonctionnement a été porté récemment à notre connaissance concernant un **Dispositif Sécurité de vide direct SV 33, réf R311044**. La cage percée du flacon de sécurité de certains lots d'appareils génère dans des conditions particulières d'utilisations un phénomène de siphon favorisant la montée de la bille dans la cage et obstruant par conséquent l'aspiration.

Cet incident déclaré a été sans gravité ni conséquence pour les utilisateurs et leur environnement.

Après analyse des causes, ce dispositif a été modifié :

- Abandon du perçage de la cage
- Limitation du débit des vannes à 90 l/min +/- 10



Produit à nous retourner

Toutefois, afin de prévenir les désagréments et les risques potentiels que pourraient provoquer cette obstruction, nous avons décidé, en accord avec l'AFSSAPS, de procéder au rappel des dispositifs de sécurité équipés d'une cage de sécurité percée. Ils sont sur le marché depuis **janvier 2006**.

Nous vous invitons donc à identifier tout produit en votre possession répondant aux spécifications suivantes :



Dispositif de Sécurité de Vide Direct

Cage de sécurité percée



Couvercle seul du Dispositif de Sécurité de Vide Direct

Les produits ci-après vous ont été livrés :

- **Qté, Sécurité de Vide Direct SV33, réf R311014, Bon livraison, Date**

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ces appareils à l'adresse suivante :

**Magasin AGA Médical
Z.I. du Bois Vert
5 Av de la Saudrune
31120 Portet-sur-Garonne**

Afin de procéder à ce remplacement, vous trouverez dans le colis ci-joint, le matériel neuf équivalent que vous pourrez conserver définitivement.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par cet incident. Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer, **Madame, Monsieur**, l'expression de nos salutations distinguées.

Claudine SARRERE
Chef de Produit Matériel