


INSTRUCTIONS

1) Avant utilisation, procédez à une inspection visuelle de la prise de pression d'entrée

Si vous observez un espace inégal entre le couvercle et le carter (voir schéma ci-dessous), ne l'utilisez pas et jetez-la.

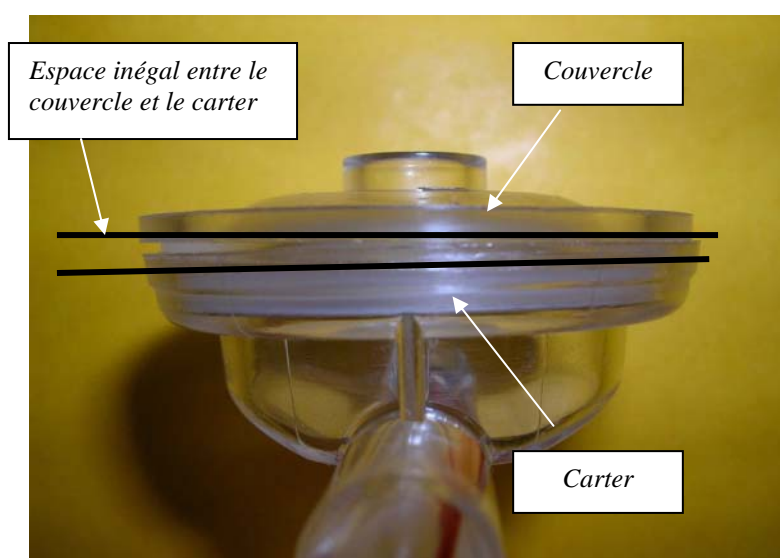

2) Lors du retrait du set, limitez la pression dans la ligne d'entrée en suivant la procédure de déchargement spécifique suivante :

Après avoir déconnecté le patient du set, procédez aux étapes suivantes :

1. Clamper et déconnecter la ligne d'anticoagulant de la seringue.
2. Clamper et connecter la ligne d'entrée à la ligne d'anticoagulant.
3. Déclamper la ligne d'entrée et la ligne d'anticoagulant.
4. Appuyer sur DECHARGER. **Ne pas retirer les prises des capteurs de pression.**
5. **Attendre au moins 2 secondes afin de permettre une diminution de la pression dans le circuit.**
6. Oter les prises des capteurs de pression du moniteur et retirer le set.
7. Jeter le set et les poches usagées.