

<b>De la part de : Philippe Courtiade</b>	<b>Directeur Général</b>
<b>Tel. : 05 34 66 63 66</b>	<b>E-mail : p.courtiade@soludia.com</b>
<b>Fax : 05 34 66 63 89</b>	
<b>A l'attention de :</b>	<b>société :</b>
<b>Tél. :</b>	<b>E-mail :</b>
<b>Fax :</b>	
<b>Référence : Rappel de lot</b>	<b>Nombre de pages (celle-ci comprise) :</b>
<b>Le :</b>	

<b>IMPORTANT</b>	<b>RAPPEL DE LOT</b>
------------------	----------------------

<b>PRODUIT :</b> BL 352	<b>LOTS :</b> 06850047
	06850053
<b>REF :</b> IB0432640	<b>CONDITIONNEMENT :</b> Unitaire

Objet: Remplacement de ligne veineuse BL 352 / IB0432640

En accord avec l'Afssaps, nous souhaitons vous informer par la présente que certains de nos clients nous ont signalé des micro-fuites sur les lignes veineuses BL352 / IB0432640, lots N° 06850047 et 06850053.

Les micro-fuites sont localisées à la jonction entre le piège à bulle et son couvercle, et elles apparaissent un certain temps après le début de la dialyse. L'anomalie semble être due à une erreur de la part d'un opérateur.

Les risques potentiels sont les suivants : faible perte de sang du patient, et possible contamination de l'utilisateur.

Par sécurité, nous vous demandons de cesser toute utilisation de ces lots et souhaitons procéder au rapatriement des produits encore en votre possession.

C'est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais la fiche "état des stocks" ci-jointe dûment complétée et signée. Nous vous remplacerons gratuitement les quantités de produits que vous serez amenés à nous retourner.

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**P. COURTIADÉ**  
**Directeur Général**  
**Pharmacien Responsable**