

GJ/SD/2005-0558

30 juin 2005

«Intitule»
«Service»
«Genre» «Titre» «Nom»
«clients_Adresse»
«clients_Adresse2»
«clients_CP» «clients_Ville»

Objet : Cathéters méthode B. Canaud

Genre,

Nous vous avons récemment informés que certains adaptateurs externes des Mono et Dual Cath® pouvaient présenter des aspérités fragilisant le silicone.

Notre fournisseur a rapidement réagi en modifiant les moules de production pour éliminer ce défaut. Le matériau de la pièce de connexion reste inchangé. L'efficacité de cette action corrective a été vérifiée par des analyses visuelles, dimensionnelles et fonctionnelles.

Toutes les références Mono et Dual Cath® fabriquées à partir du mois de juin 2005 inclus possèdent un adaptateur externe modifié.

Pour vous permettre d'utiliser les produits que vous possédez en stock en toute sécurité, nous vous ferons parvenir prochainement, via la pharmacie, des MCCAS (quantité estimée d'après votre historique 2005 des livraisons).

Nous vous demandons d'utiliser ces dispositifs pour toute implantation de Mono et Dual Cath® à la place de ceux compris dans les plateaux de cathéters, que vous devez jeter.

Nous vous recommandons également de prêter attention aux cathéters déjà posés. Si vous souhaitez remplacer les adaptateurs référence MCCAS, nous sommes à votre disposition pour vous fournir gracieusement des adaptateurs de rechange sur simple demande.

Nous vous remercions vivement de votre compréhension et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Recevez, Genre, l'expression de nos salutations distinguées.

Geneviève JOURDIN
Pharmacien Directeur

