

-1/1-

URGENT – Notice corrective de matériel médical
Systèmes Brilliance CT Big Bore Oncology, Brilliance CT Big Bore Radiology
et Brilliance CT 16 (Air) équipés de la version logicielle 3.6.0

Artefacts sur les images du suivi de bolus lors de l'utilisation d'un temps de rotation de 0,4 seconde

Les produits concernés	Tous les systèmes Philips Brilliance CT Big Bore Oncology, Brilliance CT Big Bore Radiology et Brilliance CT 16 (Air) utilisant la version logicielle 3.6.0 sont concernés.
Description du problème	<p>Le problème se limite à l'acquisition de suivi de bolus avec une étape clinique ultérieure dont le temps de rotation est de 0,4 seconde.</p> <p>Des artefacts apparaissent sur les images pendant les acquisitions de suivi de bolus avec les protocoles utilisant un temps de rotation de 0,4 seconde. Dans ces cas-là uniquement, l'acquisition peut être déclenchée trop tôt ou trop tard, et peut entraîner une opacification inappropriée du produit de contraste pendant l'acquisition clinique. Si les images acquises ne peuvent pas être utilisées à des fins diagnostiques, un nouvel examen du patient peut être réalisé.</p>
Risques liés au problème	Si un nouvel examen du patient est réalisé, le patient sera soumis à des rayonnements inutiles.
Identification des systèmes concernés	<p>Pour identifier la version logicielle du produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton "Help" (Aide). • Sélectionnez "About" (À propos de) pour afficher la version logicielle. <p>Si vous possédez un système Brilliance CT Big Bore Oncology, Brilliance CT Big Bore Radiology, ou Brilliance CT 16 (Air) équipés de la version logicielle 3.6.0, vous êtes concerné par ce problème.</p>
Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs du système concerné	Nous recommandons au client/utilisateur de se fier à ses connaissances cliniques pour déterminer si les images acquises dans le groupe de données contiennent suffisamment d'informations pour établir un diagnostic.
Actions correctives menées par Philips Healthcare	<p>Afin de remédier aux problèmes décrits ci-dessus, Philips Healthcare organise actuellement l'installation de la mise à jour logicielle version 3.6.2.</p> <p>Un responsable technique Philips vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour l'installation du logiciel sur votre site.</p>
Informations Complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole