

Interprétation pour chaque type de cassettes pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

Cassette Rh/K (Codes Produits : 707250 & 707280)																	
RHP	Réactif Étiquette	Étiquette correcte						Interprétation	R E	Étiquette inversée						Interprétation	Commentaires
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6		
		C	E	c	e	K	CTL			CTL	K	e	c	E	C		
r'r", K-	R1R2, K-	+	+	+	+	0	0	CcEe		0	0	+	+	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
r'r", K+	R1R2, K+	+	+	+	+	+	0	CcEeK		0	+	+	+	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
r"r, K-	R2r, K-	0	+	+	+	0	0	ccEe		0	0	+	+	+	0	cceeK (R0r ou rr)	PHENOTYPE INCORRECT
r"r, K+	R2r, K+	0	+	+	+	+	0	ccEeK		0	+	+	+	+	0	ccEeK	Même Phénotype
rr, K-	R0r, K-	0	0	+	+	0	0	ccee		0	0	+	+	0	0	ccee	Même Phénotype
rr, K+	R0r, K+	0	0	+	+	+	0	cceeK		0	+	+	+	0	0	ccEe (R2r ou r"r)	PHENOTYPE INCORRECT
r'r, K-	R1r, K-	+	0	+	+	0	0	Ccee		0	0	+	+	0	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
r'r, K+	R1r, K+	+	0	+	+	+	0	CceeK		0	+	+	+	0	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
r'r', K-	R1R1, K-	+	0	0	+	0	0	CCee		0	0	+	0	0	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
r'r', K+	R1R1, K+	+	0	0	+	+	0	CCeeK		0	+	+	0	0	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
ryr', K-	RzR1, K-	+	+	0	+	0	0	CCEe		0	0	+	0	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
ryr', K+	RzR1, K+	+	+	0	+	+	0	CCEeK		0	+	+	0	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
ryry, K-	RzRz, K-	+	+	0	0	0	0	CCEE		0	0	0	0	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
ryry, K+	RzRz, K+	+	+	0	0	+	0	CCEEK		0	+	0	0	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
ryr", K-	RzR2, K-	+	+	+	0	0	0	CcEE		0	0	0	+	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
ryr", K+	RzR2, K+	+	+	+	0	+	0	CcEEK		0	+	0	+	+	+	Contrôle non valide	<i>Interprétation non valide</i>
r"r", K-	R2R2, K-	0	+	+	0	0	0	ccEE		0	0	0	+	+	0	eeK	<i>Phénotype Incorrect ou Interprétation non valide</i>
r"r", K+	R2R2, K+	0	+	+	0	+	0	ccEEK		0	+	0	+	+	0	EeK	<i>Phénotype Incorrect ou Interprétation non valide</i>

Interprétation pour chaque type de cassettes pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

Cassette pour groupage ABO-Rh (Codes Produits : 707150, 707190)																	
ABE	Etiquette correcte							Interprétation	R E	Etiquette inversée						Interprétation	commentaires
	1	2	3	4	5	6	1			2	3	4	5	6			
	Réactif	A	B	AB	D	DCE	CTL			CTL	DCE	D	AB	B	A		
Etiquette	A	B	AB	D	DCE	CTL	E	A	B	AB	D	DCE	CTL				
	O Pos	0	0	0	+	+	0	O Pos		0	+	+	0	0	0	B Neg	GRUPE INCORRECT
	O Neg	0	0	0	0	0	0	O Neg		0	0	0	0	0	0	O Neg	Même Groupe
	O D-/CE+	0	0	0	0	+	0	O Neg/CE+		0	+	0	0	0	0	Discordance B/AB	Interprétation non valide
	A Pos	+	0	+	+	+	0	A Pos		0	+	+	+	0	+	Contrôle non valide	Interprétation non valide
	A Neg	+	0	+	0	0	0	A Neg		0	0	0	+	0	+	Contrôle non valide	Interprétation non valide
	A D-/CE+	+	0	+	0	+	0	A Neg/CE+		0	+	0	+	0	+	Contrôle non valide	Interprétation non valide
	B Pos	0	+	+	+	+	0	B Pos		0	+	+	+	+	0	B Pos	Même Groupe
	B Neg	0	+	+	0	0	0	B Neg		0	0	0	+	+	0	O Pos	GRUPE INCORRECT
	B D-/CE+	0	+	+	0	+	0	B Neg/CE+		0	+	0	+	+	0	Discordance B/AB	Interprétation non valide
	AB Pos	+	+	+	+	+	0	AB Pos		0	+	+	+	+	+	Contrôle non valide	Interprétation non valide
	AB Neg	+	+	+	0	0	0	AB Neg		0	0	0	+	+	+	Contrôle non valide	Interprétation non valide
	AB D-/CE+	+	+	+	0	+	0	AB Neg/CE+		0	+	0	+	+	+	Contrôle non valide	Interprétation non valide

Cassette pour dépistage et identification d'anticorps irréguliers (Poly/Neutral Cassette) (Code Produit : 707310, 707355)																	
PLN	Etiquette correcte							Interprétation	R E	Etiquette inversée						Interprétation	Commentaires
	1	2	3	4	5	6	1			2	3	4	5	6			
	Réactif	IgG,C3	IgG,C3	IgG,C3	Neu	Neu	Neu			Neu	Neu	Neu	IgG,C3	IgG,C3	IgG,C3		
Etiquette	IgG,C3	IgG,C3	IgG,C3	Neu	Neu	Neu	E	IgG,C3	IgG,C3	IgG,C3	Neu	Neu	Neu				
										Faux négatif IAT (antiglobuline)						Faux Négatif/Positif	Faux Positif /Négatif (dépistage anticorps irréguliers)
													Faux positif enzyme				

Interprétation pour chaque type de cassettes pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

ABP BioVue Nouveau - Né code produit 6901906																	
ABP	Etiquette correcte							Etiquette inversée							Commentaires		
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5		6	
	Réactif	A	B	AB	D	CTL	IgG	Interprétation	R	IgG	CTL	D	AB	B		A	Interprétation
Etiquette	A	B	AB	D	CTL	IgG		E	A	B	AB	D	CTL	IgG			
	O Pos; DAT	0	0	0	+	0	0	O Pos, DAT-		0	0	+	0	0	0	ABO Discord) faible A/B, D Neg	Discord ou INCORRECT groupe
	O Pos; DAT	0	0	0	+	0	+	O Pos, DAT+		+	0	+	0	0	0	A Neg, DAT Neg	INCORRECT groupe, FN DAT
	O Pos; DAT	0	0	+	+	+	+	Invalid, DAT+		+	+	+	+	0	0	AB Pos, DAT Neg	INCORRECT groupe; FN DAT
	O Neg; DAT	0	0	0	0	0	0	O Neg, DAT-		0	0	0	0	0	0	O Neg, DAT Neg	même interprétation
	O Neg; DAT	0	0	0	0	0	+	O Neg, DAT+		+	0	0	0	0	0	(ABO Discord), FN DAT	Dicrep, FN DAT
	O Neg; DAT	0	0	+	+	+	+	Invalid, DAT+		+	+	+	+	0	0	AB Pos, DAT Neg	INCORRECT groupe; FN DAT
	A Pos; DAT	+	0	+	+	0	0	A Pos, DAT-		0	0	+	+	0	+	ABO Discord, fbl A/B Pos, DAT Pos	???, FP DAT
	A Pos; DAT	+	0	+	+	0	+	A Pos, DAT+		+	0	+	+	0	+	A POS, DAT Pos	même interprétation
	A Pos; DAT	+	0	+	+	+	+	Invalid, DAT+		+	+	+	+	0	+	AB Pos, DAT Pos	INCORRECT groupe
	A Neg; DAT	+	0	+	0	0	0	A Neg, DAT-		0	0	0	+	0	+	O Pos, DAT Pos	INCORRECT groupe; FP DAT
	A Neg; DAT	+	0	+	0	0	+	A Neg, DAT+		+	0	0	+	0	+	(ABO Discord), D Pos, DAT Pos	Discord ou INCORRECT groupe
	A Neg; DAT	+	0	+	0	+	+	Invalid, DAT+		+	+	0	+	0	+	ABO Discord, DAT Pos	Interprétation non valide
	B Pos; DAT	0	+	+	+	0	0	B Pos, DAT-		0	0	+	+	+	0	Invalide Ctl, (ABO Discord), DAT Neg	Interprétation non valide
	B Pos; DAT	0	+	+	+	0	+	B Pos, DAT+		+	0	+	+	+	0	Invalide Ctl, DAT Neg	interprétation invalide, FN DAT
	B Pos; DAT	0	+	+	+	+	+	Invalid, DAT+		+	+	+	+	+	0	Invalide Ctl, DAT Neg	interprétation invalide, FN DAT
	B Neg; DAT	0	+	+	0	0	0	B Neg, DAT -		0	0	0	+	+	0	Invalide Ctl, DAT Neg	Interprétation non valide
	B Neg; DAT	0	+	+	0	0	+	B Neg, DAT+		+	0	0	+	+	0	Invalide Ctl, DAT Neg	interprétation invalide, FN DAT
	B Neg; DAT	0	+	+	0	+	+	Invalid, DAT +		+	+	0	+	+	0	Invalide Ctl; ABO Discord; DAT Neg	interprétation invalide, FN DAT
	AB Pos; DAT	+	+	+	+	0	0	AB Pos, DAT -		0	0	+	+	+	+	Invalide Ctl, (ABO Discord); DAT Pos	interprétation invalide, FP DAT
	AB Pos; DAT	+	+	+	+	0	+	AB Pos, DAT+		+	0	+	+	+	+	Invalide Ctl, DAT Pos	Interprétation non valide
	AB Pos; DAT	+	+	+	+	+	+	Invalid, DAT +		+	+	+	+	+	+	Invalide Ctl, DAT+	même interprétation
	AB Neg; DAT	+	+	+	0	0	0	AB Neg, DAT-		0	0	0	+	+	+	Invalide Ctl; DAT Pos	interprétation invalide, FP DAT
	AB Neg; DAT	+	+	+	0	0	+	AB Neg, DAT+		+	0	0	+	+	+	Invalide Ctl, DAT Pos	Interprétation non valide
	AB Neg; DAT	+	+	+	0	+	+	Invalid, DAT+		+	+	0	+	+	+	Invalide Ctl; ABO Discord, DAT Pos	Interprétation non valide

DAT/IDAT BioVue Coombs direct code produit 707165																	
DAT/IDAT	Etiquette correcte							Etiquette inversée							Commentaires		
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5		6	
	Réactif	IgG	C3	CTL	IgG	C3	CTL	Interprétation	R	CTL	C3	IgG	CTL	C3		IgG	Interprétation
Etiquette	IgG	C3	CTL	IgG	C3	CTL		E	IgG	C3	CTL	IgG	C3	CTL			
	IgG Pos	+	0	0				IgG Pos		0	0	+				CTL Pos, INVALID resultat	Interprétation non valide
	C3 Pos	0	+	0				C3 Pos		0	+	0				C3 Pos	même résultat
	IgG & C3 Pos	+	+	0				IgG & C3 pos		0	+	+				CTL Pos, INVALID resultat	Interprétation non valide

Interprétation pour chaque type de cassettes pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

résultats incorrects sont en rouge pour chaque configuration de cassette
résultats de test invalides dus a contrôle positif, discordance épreuve globulaire / épreuve sérique, D/D ou D/DCE discordance
case grisée en rouge représente réactif mal étiqueté et résultat incorrect

Interprétation pour chaque type de cassettes pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

Interprétation pour chaque type de cassettes pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

Interprétation pour chaque type de cassettes pour les étiquettes de cassettes mal positionnées

s