

Note de Sécurité Constructeur

Marque de l'appareil :

Oxford

Type d'appareils concernés :

Lève malade Advance, commercialisé par France Reval sous la référence 5481.00

Date : 28/04/2014

Appareils concernés :

Oxford Advance produits avant juillet 2010

Objet :

Vérification des vis de fixation sous l'embase du lève malade

Description du problème :

Suite à une préconisation du constructeur dudit lève malade dont vous trouverez la notice de sécurité jointe, et en prévention d'éventuels risques, merci de bien vouloir procéder à la vérification des 4 vis présentes sous l'embase de l'appareil (comme le montre la photo ci-après).



Trois types de vis ont été utilisés lors de la fabrication de ce lève malade avant juillet 2010 (voir photos ci-dessous, pas à l'échelle).



Type 1




Type 2




Type 3

Si les vis de l'embase de votre lève malade sont noires et correspondent aux photos de vis type 1 ou type 2, l'appareil peut être utilisé comme tel et ne nécessite aucun changement de ces vis (voir photo ci-dessous).

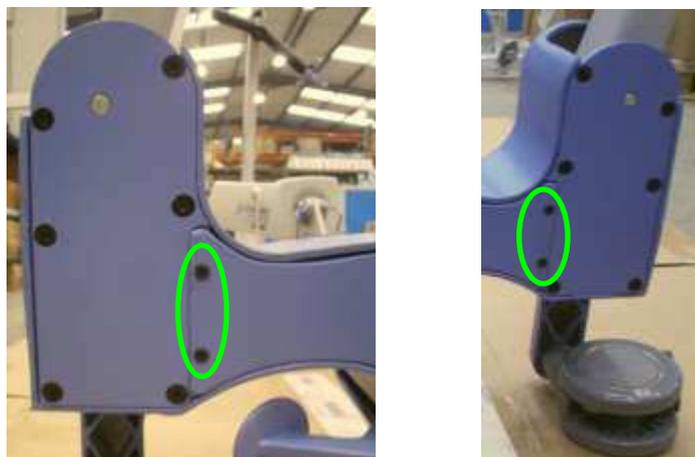

Si au contraire les vis de l'embase de votre lève malade sont argentées et correspondent à la photo de vis type 3, celles-ci doivent être remplacées (voir photo ci-dessous).

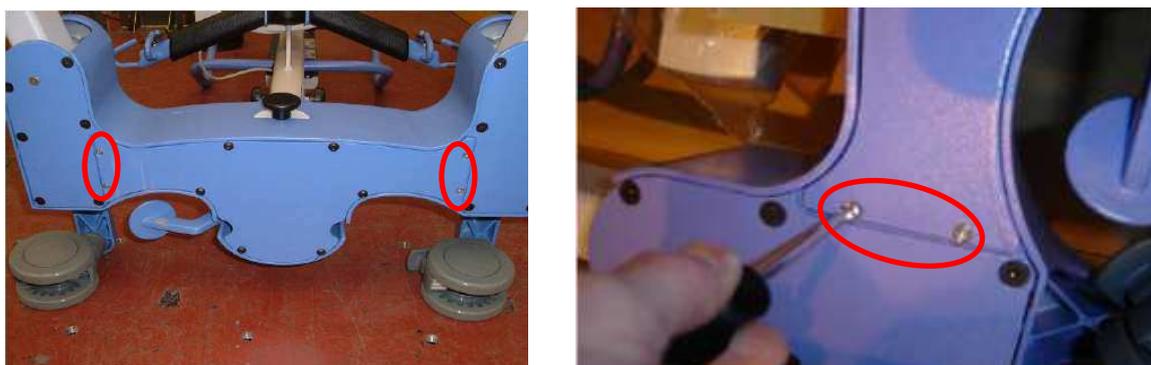

Dans ce cas, merci de revenir vers notre Service Après-Vente dans les plus brefs délais afin de procéder au changement de ces vis.

Nos coordonnées :

E-mail : sav@france-reval.com

Téléphone : 05.46.42.26.72 ou 05.46.42.26.94

Fax : 05.46.67.52.99