



URGENT : AVIS D'INFORMATION

Le 23 décembre 2014

Capsule Technologie
9 Villa Pierre Ginier
Paris, 75018
France

ID client : CT0070\$I

Objet : Avis d'information relatif au câble d'oxymétrie de pouls

Produits concernés :

Cet avis d'information concerne les câbles d'oxymétrie uSpO₂ et HPLP de Masimo.

Nos dossiers indiquent que vous possédez **10** câbles portant les références **3412**, concernés par le présent avis d'information. L'annexe 1 dresse la liste des numéros de série/lot des câbles concernés par le présent avis d'information avec l'endroit exact où ils vous ont été livrés d'après nos archives.

Motif de l'avis d'information :

Masimo a identifié un petit nombre de câbles d'oxymétrie dont les fils internes se croisent. Les performances peuvent être altérées lorsque les fils se croisent, à savoir, si une valeur de SpO₂ faible est mesurée, une valeur de SpO₂ élevée s'affiche sur l'appareil de monitoring. De même, avec le même câble d'oxymétrie, lorsqu'une valeur élevée de SpO₂ est mesurée, une valeur de SpO₂ faible s'affiche sur l'appareil de monitoring.

L'identification d'un câble d'oxymétrie comportant des fils croisés est simple. Le câble d'oxymétrie peut être identifié rapidement une fois connecté à un moniteur hôte et à un patient. Si vous utilisez un câble d'oxymétrie dont les fils sont croisés pour surveiller un patient avec une valeur de SpO₂ supérieure à 90 %, la valeur affichée sur le moniteur sera de **54 % au maximum**.

Aucun impact sur les autres produits :

À noter que cet avis d'information ne concerne aucun autre produit Masimo.

Instructions :

Veuillez évaluer rapidement votre stock de câble(s) d'oxymétrie en procédant comme suit :

Méthode :

Utilisez le câble d'oxymétrie pour mesurer la SpO₂ d'un individu en bonne santé. La valeur de SpO₂ doit être supérieure à 90 %. Vous pouvez également revoir les mesures de SpO₂ prises avec le câble d'oxymétrie et vérifier si les résultats des mesures sont cohérents avec les valeurs de SpO₂ attendues. Si les mesures de SpO₂ sont cohérentes avec la valeur de SpO₂ attendue, cela signifie que le câble d'oxymétrie n'est pas concerné et que vous pouvez continuer à l'utiliser.

- Veuillez compléter et retourner le formulaire de suivi/vérification (Annexe 2) à Masimo afin de nous informer que le(s) câble(s) d'oxymétrie fonctionne(nt) comme prévu.

Si les résultats obtenus lors de mesures de SpO₂ ne sont pas cohérents avec la valeur de SpO₂ attendue, cela signifie que le câble d'oxymétrie doit être mis hors service, isolé et renvoyé à Masimo.

- Veuillez composer le numéro 0800 006 001 pour accéder aux services techniques. Veuillez déterminer avec eux si vous souhaitez renvoyer le(s) câble(s) d'oxymétrie à Masimo pour remplacement ou remboursement. Si vous renvoyez le(s) câble(s) d'oxymétrie pour remplacement, demandez un numéro d'autorisation de retour des marchandises (appelé numéro RMA).
- Veuillez compléter et renvoyer le formulaire de suivi/vérification (Annexe 2).

Veillez remplir le formulaire de suivi/vérification qui figure dans l'Annexe 2 et le faxer à Masimo au 001 949 297 7700, même si vous ne possédez pas ou ne comptez pas utiliser le(s) câble(s) d'oxymétrie identifiés.

Si vous renvoyez un ou des câble(s) d'oxymétrie, et que vous disposez d'un numéro RMA, joignez l'annexe 2 dûment renseignée au colis contenant les câbles et inscrivez le numéro RMA sur le carton d'expédition.

En cas d'incapacité à vous conformer rapidement aux instructions :

Masimo vous encourage vivement à suivre les instructions ci-dessus. S'il vous est impossible de vous conformer rapidement aux instructions, mettez le(s) câble(s) d'oxymétrie hors service jusqu'à ce que vous puissiez procéder à l'évaluation rapide.

Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Soyez assuré que Masimo met tout en œuvre pour fournir à ses clients des produits et des services de qualité. Nous vous remercions de votre patience et de votre coopération pendant que nous travaillons activement à la résolution de ce problème.

Veillez contacter les services techniques de Masimo pour toute question ou assistance concernant cet avis d'information.

Sincères salutations,



Mathew Jimenez
VP Conformité qualité

ANNEXE 1

LISTE DES CÂBLES D'OXYMÉTRIE CONCERNÉS PAR L'AVIS D'INFORMATION

D'après nos archives, le(s) câble(s) d'oxymétrie portant le(s) numéro(s) de série/lot suivant(s) vous a(ont) été livré(s).

V32427, V32429, V32443, V32445, V32449, V32450, V32457, V32459, V32467, V32468



MASIMO CORPORATION

Forty Parker
Irvine, CA 92618