

Neuilly Plaisance, le 11 février 2015

A l'attention : des Directeurs des Etablissements de Santé  
des Correspondants de Réactovigilance  
des Responsables de Laboratoire

## **Avis relatif à la sécurité : Résultats d'analyse ABL90 FLEX**

**Niveau de Priorité : Urgent**

Cher Client,

Fin décembre 2014, RADIOMETER avait averti que des résultats d'analyse pouvaient comporter un biais si le site d'introduction de l'ABL90 FLEX était maintenu ouvert pendant plus de 30 secondes après l'aspiration d'un échantillon patient.

RADIOMETER avait également préconisé une action corrective à court terme (s'assurer que le site d'introduction soit systématiquement refermé à l'invite de l'analyseur) et avait annoncé qu'une nouvelle version de logiciel serait développée afin d'éliminer ce risque d'erreur permettant ainsi de solutionner le problème.

Cette nouvelle version de logiciel est désormais disponible (v3.1 MR3) et garantit que les résultats d'analyse ne sont plus affectés si le site d'introduction de l'analyseur est maintenu ouvert plus de 30 secondes.

### **Produit concerné :**

Analyseurs ABL90 FLEX.

### **Action corrective :**

Votre Ingénieur SAV RADIOMETER a mis à jour le logiciel de votre (vos) analyseur(s) ABL90 FLEX avec la version 3.1 MR3 et vous a communiqué le présent courrier.

Nous vous remercions par avance de compléter et retourner par fax le formulaire de réponse ci-joint dans les 7 jours suivant la réception du présent courrier.

Restant à votre écoute pour de plus amples informations, nous vous prions de recevoir, cher Client, l'expression de nos salutations distinguées.

**Marie VALENTIN**

Chef de Groupe Gaz du Sang & AQUIRE  
RADIOMETER France

## Formulaire de réponse à retourner par FAX

Réf. FAN 915-335 rev. 2

Objet : **Résultats d'analyse ABL90 FLEX**

- J'accuse réception du courrier d'information et confirme que mon (mes) analyseur(s) ABL90 FLEX ont été mis à jour avec la version de logiciel 3.1 MR3.

Merci de compléter les renseignements suivants :

\_\_\_\_\_  
Hôpital / Laboratoire

\_\_\_\_\_  
Adresse

\_\_\_\_\_  
Nom

\_\_\_\_\_  
E-mail

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date

Merci de faxer ce document au numéro suivant :

**01 43 09 81 41**