

LETTRE D'INFORMATION**Objet :**

INNO-LIA ANA Update; référence 80320; n° de lot 400908
Réactivité ligne Ro60

Cher Client,

Nous avons identifié un problème sur le lot mentionné ci-dessus, et plus particulièrement sur une possible réaction faible ou nulle de la ligne Ro60. Tous les autres marqueurs réagissent correctement sur la bandelette.

Par conséquent, voici nos recommandations :

- Interprétez les résultats du test INNO-LIA ANA Update selon l'historique clinique du patient
- Si, en fonction des données cliniques, la réactivité de Ro60 est déterminante pour le diagnostic et n'apparaît pas sur la bandelette, envisagez de réaliser un test complémentaire.
- Réévaluez les précédents résultats obtenus avec ce lot n°400908 en tenant compte des remarques ci-dessus.

Nous sommes sincèrement désolés de la gêne occasionnée. Nous recherchons activement la cause de ce problème afin d'éviter qu'il ne se reproduise.

N'hésitez pas à contacter votre correspondant local ou notre service Support Clients pour toute demande complémentaire : customer.support@fujirebio-europe.com; tél. +32 9 329 16 11; fax. +32 9 329 17 75)

Merci de bien vouloir compléter l'accusé de réception ci-dessous et le faxer au 00 32 9 329 17 75

Fax : +32 9 329 17 75

Nom :

Etablissement :

Signature :

Cordialement,

Marijke De Roeve
Quality and Compliance Manager

Rikkert Maertens
Sr. Marketing Manager