

Nom Didier FAVERDIN  
Entité HC CX SWE FR IM CS TS RO&MI

Siemens S.A.S., HC CX SWE FR IM CS TS RO&MI,  
40 avenue des fruitiers , 93527 Saint-Denis

Téléphone 0820 80 75 69  
Email [didier.faverdin@siemens.com](mailto:didier.faverdin@siemens.com)  
Nos ref : TH 016 14 S

A l'attention du Directeur de l'Etablissement,  
du correspondant local de matériovigilance  
et du Chef de service de radiothérapie/Oncologie

Date

## Urgent : Action corrective produit Notification de sécurité

Recommandé avec A/R n°:

Poste technique :  
Modification : TH 016 14 S  
Matériel concerné : Accélérateurs linéaires numériques de type MEVATRON™, PRIMUS™, ONCOR™ et ARTISTE™

**Objet : Mise à jour des accélérateurs linéaires numériques de type MEVATRON™, PRIMUS™, ONCOR™ et ARTISTE™**

Chère cliente, cher client,

Cette lettre a pour objet de vous informer d'une prochaine action corrective concernant votre accélérateur linéaire (LINAC). La carte électronique « head driver-G41 » doit être remplacée par une nouvelle version.

### **Quel est le problème et quand apparaît-il ?**

Siemens a été informé de cas de surchauffe d'une des cartes (head driver-G41) située à l'intérieur du bras de l'accélérateur linéaire. Après une analyse détaillée, il est apparu que le problème est dû à l'un des composants de la carte « head driver-G41 ».

### **Que va faire Siemens pour résoudre ce problème ?**

Siemens a revu la conception de la carte « head driver-G41 » pour réduire le risque de surchauffe locale au niveau de la carte mère dans le G41. La présente action corrective comprend le remplacement dans votre accélérateur linéaire, de la carte « head driver-G41 » par un nouveau modèle (nouvelle conception).

Siemens S.A.S.

40 avenue des fruitiers  
93527 Saint-Denis  
France

01 85 57 00 00

# SIEMENS

Veillez intégrer cette notification de sécurité dans le manuel de l'exploitant de votre 'accélérateur linéaire numérique, au chapitre « Consignes de sécurité », où il devra rester.

L'ANSM a été informée de cette notification de sécurité.


Pour toute question relative à ce courrier, vous pouvez également contacter le centre de support client Siemens Healthcare France au 0 820 80 75 69.

Veillez nous excuser pour le désagrément occasionné. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

Veillez agréer, chère cliente, cher client, nos respectueuses salutations.



**Didier FAVERDIN**  
Responsable d'Activité Radiothérapie

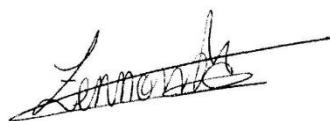

**Nadia CALATAYUD**  
Responsable Affaires Réglementaires