

Instructions d'utilisation simplifiées pour le système Accu-Chek® Spirit Combo

Remplacement de la cartouche* d'une pompe Accu-Chek Spirit Combo.

* La cartouche est également appelée réservoir.



Retirez le capuchon protecteur de la cartouche (assurez-vous de ne pas toucher l'extrémité de la cartouche).



Insérez l'adaptateur sur la cartouche jusqu'à la butée.



Préparez soigneusement un dispositif de perfusion neuf, conformément au mode d'emploi fourni.



Vissez l'embout luer-lock du dispositif de perfusion sur l'adaptateur. Ne forcez pas.


Important




Orientez la pompe, côté adaptateur vers le bas puis retirez la cartouche de la pompe. Dévissez délicatement. Ne sortez pas la cartouche tant qu'elle n'est pas complètement dévissée.



Appuyez sur la touche *Menu* (☰) pour accéder à l'écran « CHANGEMENT DE CARTOUCHE ». Appuyez sur la touche *Valider* (✓) pour confirmer.

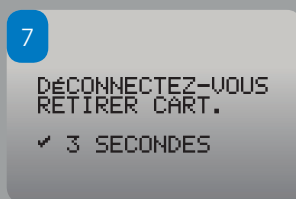

Assurez-vous que le dispositif de perfusion est retiré et que la cartouche est bien sortie de la pompe. Maintenez la touche *Valider* (✓) enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie.

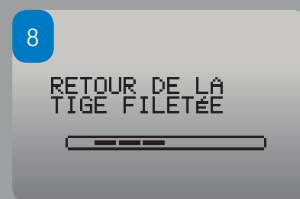

La tige filetée télescopique revient alors à sa position initiale. Ne touchez pas la tige filetée et n'entrez pas son mouvement pendant son retour, cela risquerait d'endommager la pompe.



Lorsque la tige filetée télescopique est complètement revenue à sa position initiale, l'écran « VOLUME CARTOUCHE » apparaît et affiche le volume maximal de la cartouche (315U).



Tenez la pompe en position verticale. De même, tenez la nouvelle cartouche remplie de sorte que l'adaptateur et le dispositif de perfusion soient orientés vers le haut et rapprochez les parallèlement au compartiment de la cartouche.



Assurez-vous que l'extrémité supérieure de la partie filetée de l'adaptateur est au même niveau que le bord supérieur du compartiment la cartouche.



Appuyez sur la touche *Haut* (▲) ou sur la touche *Bas* (▼) pour faire avancer la tige filetée télescopique jusqu'à ce que son socle se trouve au niveau du bord inférieur du piston de la cartouche.

Important



Orientez la pompe, côté adaptateur vers le bas. Insérez la cartouche dans le compartiment à cartouche.



Vissez l'adaptateur (ne le poussez pas) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien positionné contre le bord supérieur du compartiment de la cartouche de la pompe.




La cartouche est correctement insérée lorsque le piston de la cartouche repose sur le socle de la tige filetée télescopique.




Si le socle de la tige filetée télescopique n'est pas au même niveau que le piston de la cartouche, retirez la cartouche du compartiment et reprenez les étapes 10 à 14.



Vérifiez que l'embout luer-lock du dispositif de perfusion est toujours correctement relié à l'adaptateur. Vissez le dispositif de perfusion manuellement et dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé à l'adaptateur.

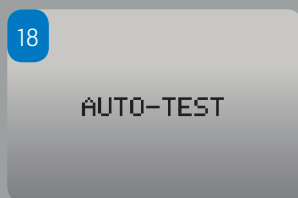

Appuyez sur la touche *Valider* (✓) après avoir mis en place la cartouche. La pompe effectue un auto-test.

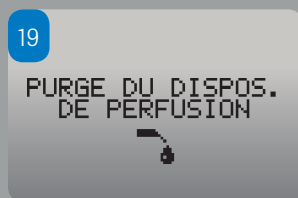

L'écran « PURGE DU DISPOS. DE PERFUSION » s'affiche une fois l'auto-test terminé.



Un usage incorrect peut endommager votre pompe.



N'insérez PAS la cartouche dans la pompe sans l'avoir au préalable reliée au dispositif de perfusion. Cela pourrait provoquer une fuite d'insuline dans le compartiment de la cartouche pouvant potentiellement endommager ou bloquer le moteur de la pompe à insuline.



NE tenez PAS la pompe en position verticale (adaptateur vers le haut) lorsque vous insérez la cartouche. Cela pourrait provoquer une fuite d'insuline dans le compartiment de la cartouche et bloquer la tige filetée télescopique. En conséquence, la pompe afficherait un message d'erreur E6 ou E10 ou se mettrait en mode STOP.