


## Avis urgent relatif à la sécurité Référence : 13830/AE016

### Annexe 2 – uniquement pour les utilisateurs de DataSite

Pour mettre à jour la dilution initiale et la dilution réflexe, veuillez procéder aux étapes ci-dessous :

- Connectez-vous au logiciel DataSite à l'aide d'un code d'utilisateur aux droits d'accès complets.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Examens > Examens**.

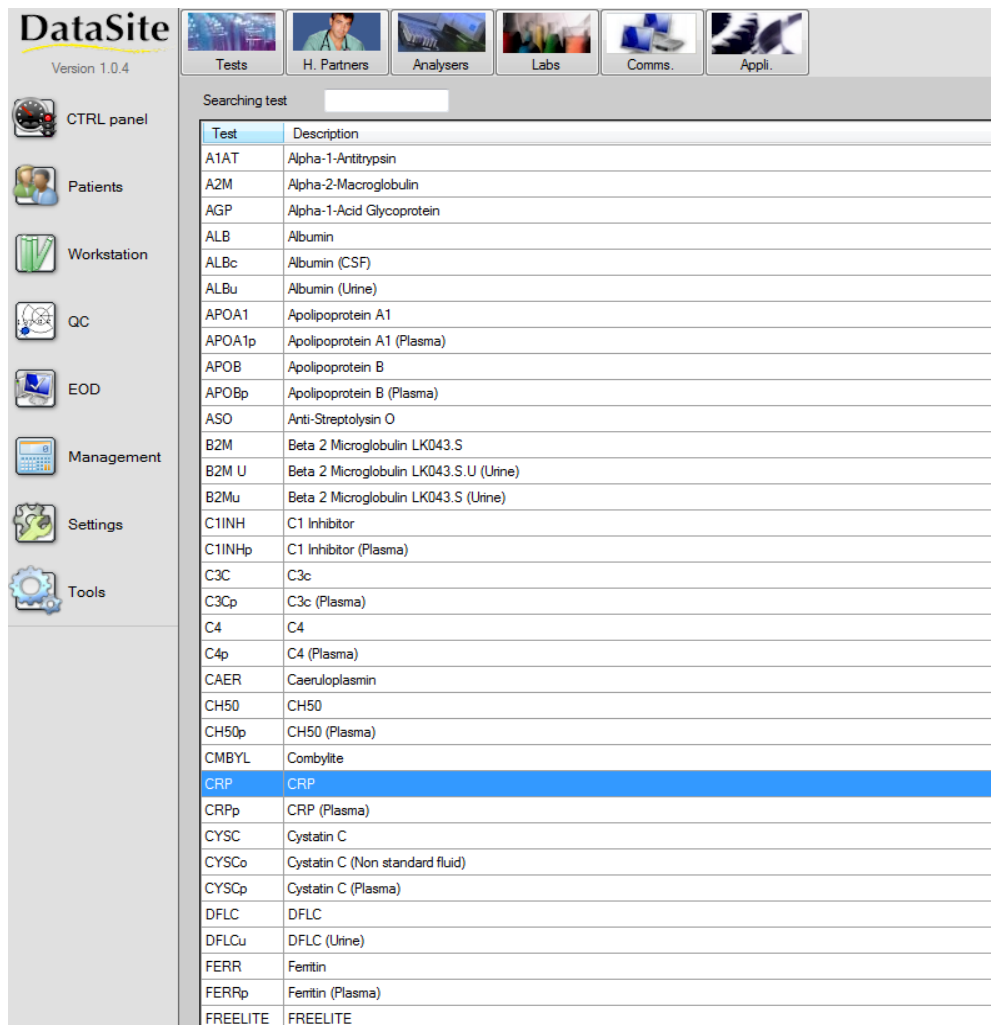

**DataSite**  
Version 1.0.4

CTRL panel  
Patients  
Workstation  
QC  
EOD  
Management  
Settings  
Tools

Tests H. Partners Analysers Labs Comms. Appli.

Searching test

Test	Description
A1AT	Alpha-1-Antitrypsin
A2M	Alpha-2-Macroglobulin
AGP	Alpha-1-Acid Glycoprotein
ALB	Albumin
ALBc	Albumin (CSF)
ALBu	Albumin (Urine)
APOA1	Apolipoprotein A1
APOA1p	Apolipoprotein A1 (Plasma)
APOB	Apolipoprotein B
APOBp	Apolipoprotein B (Plasma)
ASO	Anti-Streptolysin O
B2M	Beta 2 Microglobulin LK043.S
B2M U	Beta 2 Microglobulin LK043.S.U (Urine)
B2Mu	Beta 2 Microglobulin LK043.S (Urine)
C1INH	C1 Inhibitor
C1INHp	C1 Inhibitor (Plasma)
C3C	C3c
C3Cp	C3c (Plasma)
C4	C4
C4p	C4 (Plasma)
CAER	Caeruloplasmin
CH50	CH50
CH50p	CH50 (Plasma)
CMBYL	Combylite
<b>CRP</b>	<b>CRP</b>
CRPp	CRP (Plasma)
CYSC	Cystatin C
CYSCo	Cystatin C (Non standard fluid)
CYSCp	Cystatin C (Plasma)
DFLC	DFLC
DFLCu	DFLC (Urine)
FERR	Ferritin
FERRp	Ferritin (Plasma)
FREELITE	FREELITE

2. Double-cliquez sur CRP dans la liste puis sélectionnez l'onglet « Connexion ».

3. Sous « Codes ALLER », à gauche de la fenêtre, remplacez 29/1:1 par 29/1:10.

#### The Binding Site Group Ltd


8 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1QT, United Kingdom.

Tel: +44 (0)121 456 9500 Fax: +44 (0)121 456 9749

info@bindingsite.co.uk www.bindingsite.co.uk

Registered in England Number 5508774

The Specialist Protein Company

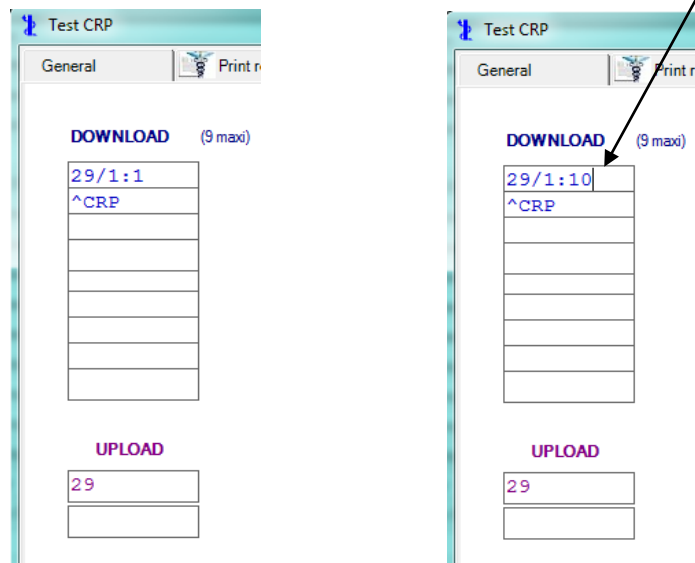

Test CRP

General Print n


DOWNLOAD (9 maxi)

29/1:1  
^CRP

UPLOAD

29

4. Cliquez sur «Valider» en bas à droite de la fenêtre pour sauvegarder les modifications et fermer la fenêtre.
5. Dans Paramètres, sélectionnez **Automates> Général**. Cliquez une fois sur l'analyseur SPAPLUS (si plusieurs analyseurs SPAPLUS sont connectés, sélectionnez l'analyseur utilisé pour la CRP).

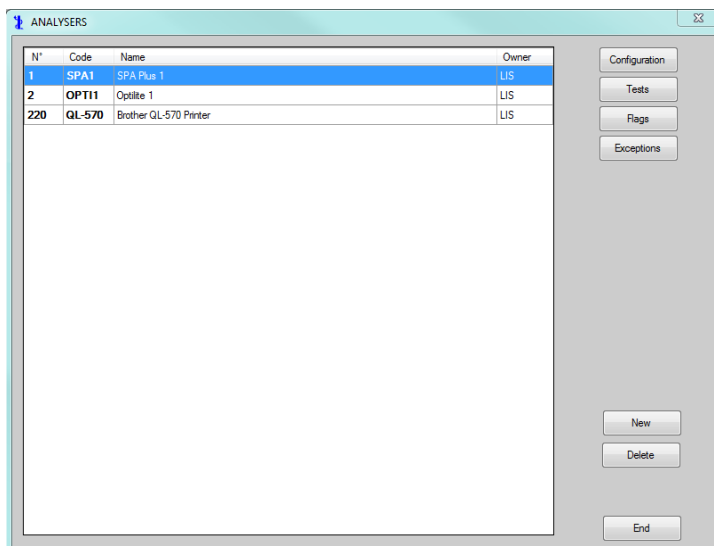

N°	Code	Name	Owner
1	SPA1	SPA Plus 1	LIS
2	OPT11	Optilte 1	LIS
220	QL-570	Brother QL-570 Printer	LIS

Configuration

Tests

Flags

Exceptions

New

Delete

End

6. Cliquez sur le bouton « Analyses » à droite de la fenêtre.
7. Pour CRP, double-cliquez sur la coche violette dans la colonne « Dilution ».

## The Binding Site Group Ltd

8 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1QT, United Kingdom.



Tel: +44 (0)121 456 9500 Fax: +44 (0)121 456 9749

info@bindingsite.co.uk www.bindingsite.co.uk

Registered in England Number 5508774

The Specialist Protein Company

- Modifiez la dilution standard Std 1:1 par Std 1:10.
- Modifiez la dilution sur la ligne du dessous 1:10 par 1:1.

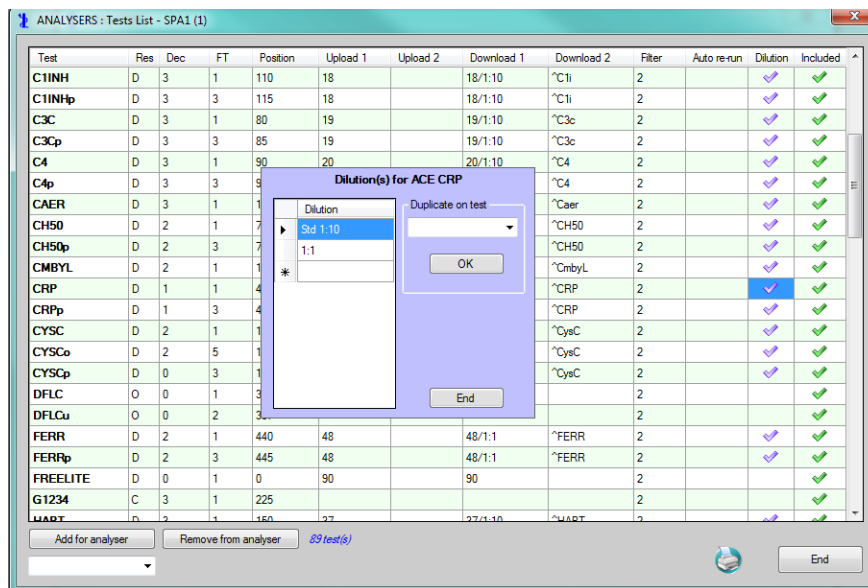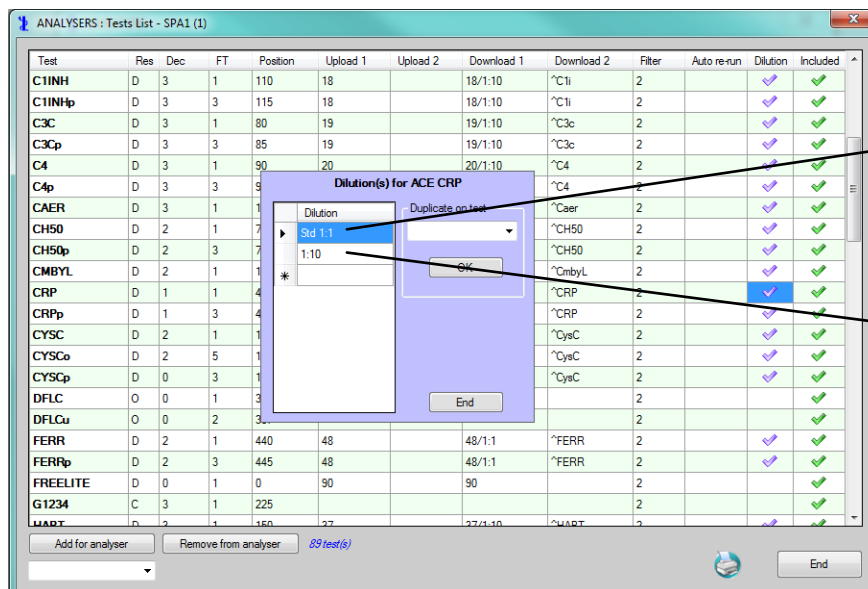

8. Cliquez sur « Fin » pour sauvegarder les modifications et fermer la fenêtre Dilutions.
9. Cliquez sur « Fin » en bas à droite de la fenêtre.
10. Quittez le logiciel DataSite et redémarrez le PC DataSite.