

Field Safety Notice
NPT6287LA - NPT6288LA – NPT6289LA
LCRD2 Tubes d'entrée et sortie dans le même compartiment

Macopharma réf: 1511 127

Signalement d'incident n° [201515257](https://www.mdrfrance.fr/medecine/2015/15257)

Tourcoing le, 23/11/2015

Madame, Monsieur,

Macopharma a été informé le 19/11/2015 de la présence de 2 filtres défectueux sur le lot 278315H25 référence NPT6288LA : absence de filtration effective au travers du média filtrant des filtres LCRD2.



Recommandations:

La détectabilité de ce défaut isolé est aisée : passage direct du sang vers la poche de recueil sans traverser le média-filtrant du filtre. En conséquence, une des faces du filtre reste totalement blanche. Macopharma demande à tous ses clients qu'un contrôle visuel soit réalisé et documenté en Préparation sur tous les produits de la référence NPT6287LA/ NPT6288LA / NPT6289LA au moment de la filtration.

Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-joint pour nos dossiers, indiquant que vous avez reçu cet FSN et qu'il a été diffusé au sein de votre EFS.

Field Safety Notice
NPT6287LA - NPT6288LA – NPT6289LA
LCRD2 Tubes d'entrée et sortie dans le même compartiment

Veillez compléter ce document et l'envoyer au numéro de fax suivant +33 3 20 11 84 90
ou par e-mail : cellule.materiovigilance@macopharma.com au plus tard le **25/11/2015**

Nom de l'EFS	
Adresse	
Ville	
Nom	
Fonction	
Numéro de telephone :	
Date:	
Signature:	