



TELECOPIE pour remise immédiate – Merci

## RETRAIT DE LOT

A l'attention des Responsables de laboratoires, des Directeurs des  
Etablissements de Santé et des Correspondants locaux de Réactovigilance

<i>De</i>		Date :	<i>A l'attention de</i>	
NOM :	<b>DIAGAST</b>	07/12/2015	Laboratoire :	«DIA_RAISONLIV»
	Support Clients			«DIA_NOMRED»
Fax N° :	03.20.96.53.64		Fax N° :	«DIA_FAX»
Tél. N° :	03.20.96.53.65	<b>Attention ce fax</b>	Tél. N° :	«DIA_TELCLILIV»
		<b>comporte</b>	Client N° :	«DIA_CLIENT» «QF»
		<b>plusieurs pages</b>		

**Objet : ANTI-Jkb (JK2) PK (réf. : 73023, lot 007000)**

Chère cliente, cher client,

Vous êtes utilisateur de notre réactif ANTI-Jkb (JK2) PK et vous avez reçu des coffrets du lot 007000 qui périment au 30/01/2016.

### Description

Suite à un signalement sur le lot 007000 en France, nous tenons à vous informer que ce lot peut engendrer des réactions faussement négatives pour certaines hématies hétérozygotes Jka+b+ (< 1%).

Ce réactif est exclusivement destiné à la qualification de dons de sang selon des procédures basées sur deux déterminations.

### Actions utilisateurs

Par conséquent, nous vous prions de ne plus utiliser ce lot de réactif, de nous indiquer la quantité restante à votre disposition et de la détruire. Nous pourrions procéder à l'échange gratuit dès réception de ce document renseigné (voir encart au bas de ce fax).

...



TELECOPIE pour remise immédiate – Merci

## RETRAIT DE LOT

A l'attention des Responsables de laboratoires, des Directeurs des  
Etablissements de Santé et des Correspondants locaux de Réactovigilance

Pour tout support complémentaire, nos équipes sont à votre écoute au 03 20 96 75 47.

L'ANSM a été informée de cette communication.

Conscients de la gêne occasionnée dans votre laboratoire, nous vous prions d'accepter  
toutes nos excuses.

Veillez agréer, Chère Cliente, Cher client, nos respectueuses salutations.

Jean-Michel BASSE  
Directeur Qualité et Affaires Réglementaires

---

**Réactif : ANTI-Jkb (JK2) PK (réf. : 73023, lot 007000)**

A RENVoyer au n° de fax : 03 20 96 53 64

Soussigné : \_\_\_\_\_

Laboratoire : \_\_\_\_\_

Nous accusons réception de cette information et vous informons que notre stock restant est  
de ..... coffrets que nous nous engageons à détruire.

Date

Signature et cachet