

INFORMATION DE SECURITE

Défibrillateur FRED easy

Votre Défibrillateur FRED Easy est équipé d'une pile interne, indépendante de la pile principale (bleue), qui doit être remplacée tous les 6 ans.
Cette opération est décrite dans la notice d'utilisation, dans le paragraphe « MAINTENANCE »

« Le remplacement de cette pile tous les 6 ans est obligatoire, il en va du bon fonctionnement de votre défibrillateur ».


Si votre FRED Easy a plus de 6 ans, veuillez prendre contact avec votre distributeur SCHILLER France au N° Vert : 0820 20 22 25.

En cas de non-respect de cet entretien, votre FRED easy pourrait ne plus pouvoir être mis en marche pour effectuer une défibrillation efficace.

Cette opération requiert l'intervention de personnel qualifié et habilité par notre filiale de distribution, le démontage de l'appareil est nécessaire. Une maintenance complète est réalisée durant cette intervention.

Si vous avez un contrat de maintenance avec une société habilitée (SCHILLER France, D_fibrillateur à Fezin et MEDICO) par le Groupe SCHILLER, cette opération est gérée dans ce cadre.

Nous vous rappelons que la société SCHILLER recommande que votre défibrillateur soit **maintenu au minimum tous les 36 mois.**

Si votre défibrillateur est âgé de plus de 6 ans et en attendant cette opération de maintenance, vous pouvez le laisser en service, en contrôlant, une fois par mois son bon fonctionnement, en l'allumant par le bouton 

Wissembourg, le

