

INFORMATION DE SECURITE

Moniteur / Défibrillateur Defigard Touch7

Défaut Constaté :

Lors de tests de fonctionnement de longue durée, SCHILLER Médical a détecté, sur un appareil Defigard Touch7, une panne d'alimentation interne, se manifestant par son extinction lors d'une charge du condensateur de défibrillation.

La fonction Monitoring reste fonctionnelle.

L'origine de ce dysfonctionnement est la dégradation d'un des contacts de la batterie principale du Defigard Touch7.

A ce stade des essais, ce défaut est considéré comme un vieillissement prématuré de cet élément.

Pour l'instant, aucun signalement similaire ne nous est parvenu d'un utilisateur.

Dispositifs concernés :

Sont concernés par cette information de sécurité, tous les Dispositifs portant les n° de série entre 128995000101 et 128996000623

Remède :

SCHILLER Médical va échanger préventivement tous les contacts de batterie des appareils nommés ci-dessus.

Vous allez être contactés par notre Distributeur, qui conviendra d'un planning de mise à jour.

Mesures conservatoires :

En attendant la mise à jour de votre Defigard Touch7, vous pouvez continuer à l'utiliser sans restriction.

Wissembourg, le 20 Avril 2016



Alain Weissinger
Responsable Qualité



THE ART OF DIAGNOSTICS