

URGENT – INFORMATION SECURITE PRODUIT

Juillet 2016

Nom du produit	Référence	Numéro de lot	Date d'expiration
BD Columbia III Agar with 5% Sheep Blood	254098	6033400	28 avril 2016

Cher client,

BD a récemment confirmé une contamination de *Listeria monocytogenes* sur les milieux de culture précoulés contenant du sang de mouton (référence et numéro de lot ci-dessus). BD a identifié la source de contamination à *Listeria* comme étant le sang de mouton utilisé dans la fabrication du milieu précoulé.

Nos rapports indiquent que le numéro de lot indiqué ci-dessus a été livré dans votre laboratoire. Nous vous demandons donc de cesser d'utiliser ce lot et de jeter tout produit restant. BD remplacera tout produit jeté.

De plus, BD rappelle l'importance d'inspecter visuellement tous les milieux de culture précoulés avant utilisation pour s'assurer qu'il n'y a aucune contamination sur la surface du milieu ou dans la masse. Les informations et les conditions d'utilisation ci-dessous doivent également être prises en compte:

- *Ne pas utiliser les boîtes si elles montrent une preuve de contamination microbienne, de décoloration, de dessèchement, de fissuration ou tout autre signe de détérioration.*
- *Pour l'identification, les organismes doivent être dans une culture pure. Des tests morphologiques, biochimiques et/ou sérologiques devraient être exécutés pour l'identification finale.*
- *Pour les instructions générales d'utilisation veuillez consulter le document détaillant les procédures de traitement aseptique, les dangers biologiques et la disposition du produit utilisé.*

Si vous avez observé une gélose sans preuve d'une contamination microbiologique et qu'une *Listeria* s'est développée, veuillez consulter le clinicien pour s'assurer que le résultat est concordant avec les signes cliniques des patients.

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire, ci-joint, **que vous avez ou non encore ce produit en stock** pour que nous puissions confirmer la bonne réception de cette notification et assurer le remplacement du produit.

Une fois complété, merci de faxer le formulaire à l'attention du support applicatif BD-Diagnostic Systems au 04.76.68.35.04 ou par email à l'adresse suivante : support_applicatif_bdds@europe.bd.com.

Vous priant d'accepter nos excuses pour les inconvénients potentiels occasionnés par cette situation, nous vous confirmons que BD s'engage à vous fournir des produits de haute qualité.

Cordialement,

Fabien MASINI
BD Life Sciences – Diagnostic Systems
Fax ou Email à: Support Applicatif BD DS France
Fax #: 04.76.68.35.04
Email: support_applicatif_bdds@europe.bd.com



**VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE AFIN D'ACCUSER DE LA BONNE
RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION (MC 640)**

Merci de ne remplir qu'un seul formulaire

Nom du produit	Numéro de référence	Numéro de lot	Date d'expiration
BD Columbia III Agar with 5% Sheep Blood	254098	6033400	28 avril 2016

Etablissement: _____
Nom complet. Nom actuel de l'établissement. Ne pas utiliser d'initiales.

Adresse: _____

Ville : _____ **Code Postal:** _____

Personne à contacter : _____

Téléphone : _____ **Fax :** _____

Nombre total d'unité affectés en réserve:

Nom du produit	Référence	Quantité pour le remplacement
Columbia III Agar with 5% Sheep Blood	254098	