


Cher client,
cher partenaire,

Fournir des produits de qualité à nos clients est essentiel pour la société S.I.M.E.O.N.. C'est la raison pour laquelle, nous contrôlons en permanence la qualité et le comportement de nos produits dans la pratique. Nous souhaitons vous informer que nous avons effectué un contrôle volontaire prévu de notre système d'axe central. Le contrôle portait sur les axes centraux qui ont été fabriqués entre le 01/03/2014 et le 30/04/2016.

Nous avons été avertis par un rapport venu des États-Unis qu'il était possible que les axes centraux issus de la période mentionnée ci-dessus n'avaient pas été complètement vissés.

Seul le bras de la flèche de l'axe central est concerné. Les vis servent à fixer le profilé extrudé à la « tête de palier grand format ». Étant donné que le profilé extrudé est également collé, il s'agit d'un système redondant.

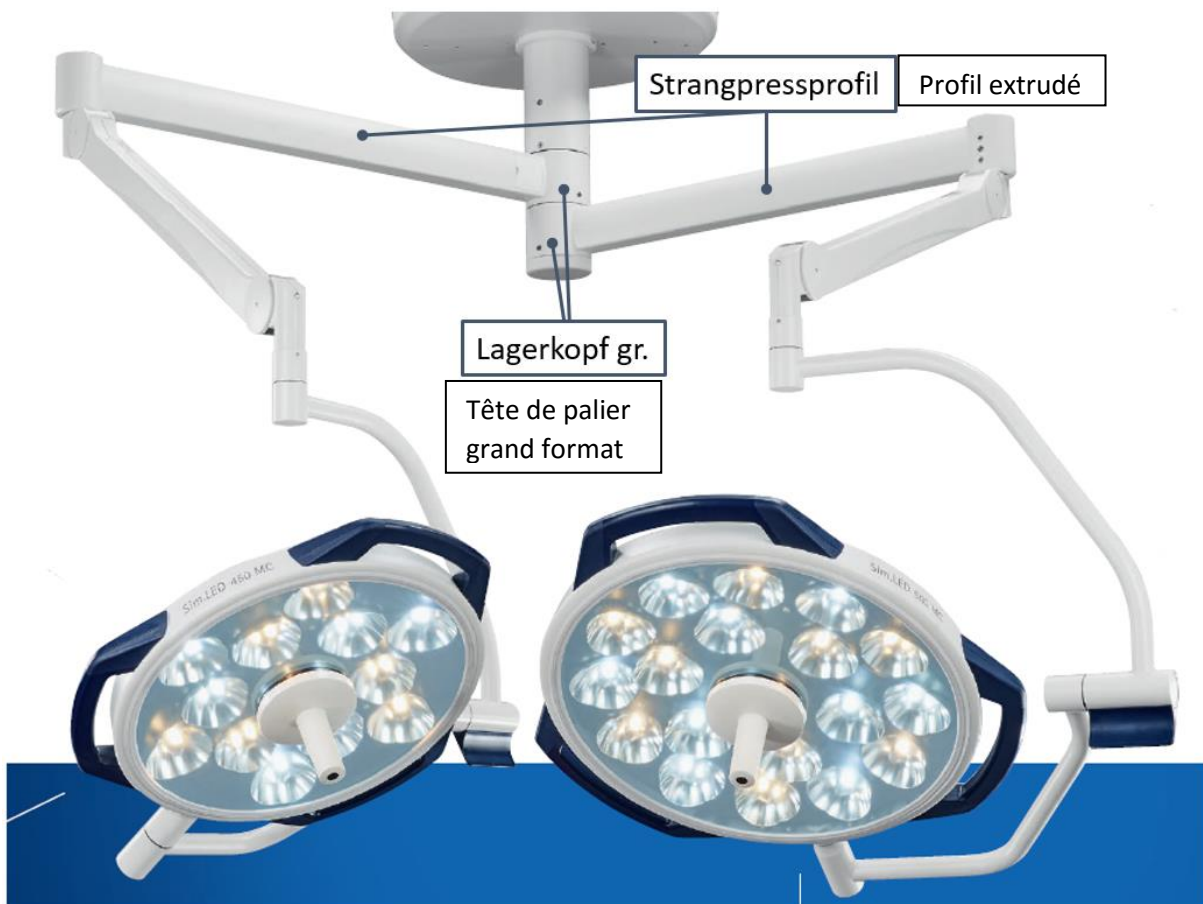

Ill. 1 : Configuration du profilé extrudé et de la tête de palier grand format sur le système d'éclairage

Nous avons décidé de mettre en place une mesure préventive qui consiste à vérifier les axes centraux concernés à l'aide d'un test avec un aimant très simple que nous avons

développé. Le test ne dure que quelques minutes et peut être réalisé par toute personne dans l'hôpital.

Veillez nous excuser des éventuelles complications que cela pourrait occasionner. La qualité et la sécurité du patient sont pour nous une priorité et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place cette mesure préventive.

La présente information doit être communiquée à toutes les personnes concernées dans votre établissement ainsi que dans chaque établissement auquel les appareils potentiellement concernés ont été transmis.

Cordialement,

Dr. Markus Keussen

Direction