

Tomodensitométrie

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical

Scanner spectral IQon Spectral CT

Problèmes relatifs à l'annotation du type de données d'images spectrales

Systèmes concernés	<p>Ces problèmes sont liés au logiciel. Le système suivant équipé de la version logicielle suivante est concerné :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scanner spectral IQon Spectral CT <p>Version logicielle concernée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.7
Description du problème	<p>Problème relatif à l'annotation lors de l'enregistrement et de la prise de vue Lors de la prise de vue de résultats spectraux et de l'enregistrement d'une nouvelle série à partir du film, toutes les images de la nouvelle série affichent le même type de données et ce, à partir des premières images enregistrées. Par conséquent, cela peut engendrer une situation dans laquelle, au sein de séries mixtes d'images, une image d'un certain type d'image spectrale serait annotée comme étant une image d'un type de données différent. L'annotation serait alors incorrecte.</p> <p>Problème relatif à l'annotation lors de l'enregistrement dans une série Lors de l'ajout d'images d'un seul type spectral à une série qui a déjà été nommée pour inclure un autre type spectral dans Spectral CT Viewer (sCTV), une série mixte est créée alors que la description de la série indique le type d'origine des images incluses dans la série. Les images de la série sont alors annotées comme étant d'un type d'image spectrale spécifique, alors qu'elles appartiennent en réalité à un autre type. Il s'agit d'une annotation incorrecte.</p>
Risques liés au problème	<p>Le risque est d'obtenir une erreur de diagnostic potentielle liée à une identification incorrecte du type de données de certaines images spectrales. Les risques sont liés à :</p> <p>Problème relatif à l'annotation lors de l'enregistrement et de la prise de vue Annotations erronées avec un type de données incorrect des images spectrales scannées. Annotations erronées des images enregistrées dans la nouvelle série à partir du film</p> <p>Problème relatif à l'annotation lors de l'enregistrement dans une série Annotations erronées sur la série enregistrée avec un type de données mixte d'images spectrales à l'aide de sCTV</p>

Tomodensitométrie

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical

Scanner spectral IQon Spectral CT

Problèmes relatifs à l'annotation du type de données d'images spectrales

<p>Identification des systèmes concernés</p>	<p>Déterminez si vous êtes en possession d'un système susceptible d'être concerné par ce problème, puis identifiez votre version logicielle. Système concerné :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scanner spectral IQon Spectral CT <p>Pour identifier la version logicielle de votre produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton "Help" (Aide). • Sélectionnez "About" (À propos de) pour afficher la version logicielle. <p>Les produits concernés afficheront la version logicielle suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.7
<p>Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur</p>	<p>Problème relatif à l'annotation lors de l'enregistrement et de la prise de vue Ne procédez pas à l'enregistrement d'images à partir de l'application du film. Si l'enregistrement d'images à partir de l'application du film est nécessaire, n'enregistrez qu'une seule image ou, avant de procéder à l'enregistrement, assurez-vous que toutes les images dans l'application du film appartiennent au même type d'images spectrales.</p> <p>Problème relatif à l'annotation lors de l'enregistrement dans une série N'utilisez pas Spectral CT Viewer pour ajouter des images spectrales de type différent à une série existante et pour créer ainsi une série mixte d'images spectrales. Si l'enregistrement d'images spectrales dans une nouvelle série est nécessaire dans Spectral CT Viewer, enregistrez uniquement un seul type d'image spectrale dans la nouvelle série.</p>
<p>Actions menées par Philips Healthcare</p>	<p>Philips Healthcare informe tous les utilisateurs concernés par ces problèmes par l'intermédiaire de cette Notification de sécurité produit. Une action corrective sera mise en place afin de corriger ces problèmes. Un responsable technique Philips vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour l'installation des mises à jour (FCO) sur votre site. Référence de l'action corrective (FCO) : 72800659.</p>

Tomodensitométrie

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical

Scanner spectral IQon Spectral CT

Problèmes relatifs à l'annotation du type de données d'images spectrales

Informations complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole.
---	--