

**À nos clients des Oxylog 2000 *plus*
Dräger et Oxylog 3000 *plus* Dräger**

Février 2014

Consigne importante de sécurité !!!

**Oxylog 2000 *plus* Dräger, référence produit 5705080
Oxylog 3000 *plus* Dräger, référence produit 5704833**

Message d'erreur *Potentiomètre débranché*

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos contrôles qualité lors de la production, nous avons constaté que des appareils affichaient de plus en plus souvent le message d'erreur *Potentiomètre débranché*.

Nos Investigations ont révélé qu'un lot limité de circuits imprimés de la face avant, sur lesquels les potentiomètres de réglage des paramètres de ventilation sont soudés, était défectueux. Cela peut entraîner une interruption du contact avec le potentiomètre respectif. En conséquence, l'appareil interrompt la ventilation, émet une alarme sonore et affiche le message d'erreur *Potentiomètre débranché*. Malgré nos tests de contrôle qualité complets, une partie du lot concerné a été livrée en septembre 2013.

Si cette erreur survient, l'utilisateur doit, conformément aux indications de la notice d'utilisation, commencer immédiatement une ventilation avec un système de ventilation indépendant (insufflateur manuel).

Sont concernés les appareils de types Oxylog 2000 *plus* (référence produit 5705080) et Oxylog 3000 *plus* (référence produit 5704833) dont les numéros de série sont énumérés en page 3 de la présente lettre. La référence produit et le numéro de série sont indiqués sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
Adresse postale :
23542 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
N° TVA intracom.
DE813745277

Coordonnées bancaires :
Commerzbank AG, Lübeck
N° de compte 014 679 500
Code banque 230 400 22
IBAN DE95 2304 0022 0014 6795 00
Code SWIFT COBADEFF230

Sparkasse zu Lübeck
N° de compte 1 071 117
Code banque 230 501 01
IBAN DE15 2305 0101 0001 0711 17
Code SWIFT NOLADE21SPL

Siège de la société : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck HRB 4358
Lü

Président du Conseil de Surveillance :
Professeur Dr Nikolaus Schweickart

Direction :
Stefan Dräger (Président)
Dr Herbert Fehrecke
Andreas Frahm
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schrofner

Page 2 / 3

Notre organisation de service vous contactera prochainement pour organiser une modification gracieuse de vos appareils.

Nous regrettons les désagréments liés à cette opération, mais pensons que cette mesure est indispensable dans l'intérêt de la sécurité des patients et des utilisateurs.

Pour toute question supplémentaire, votre interlocuteur Dräger se tient volontiers à votre disposition.

Sincères salutations

Tobias Winkler
Head of Key Application Field
Respiratory Care

Annexe :
Liste des numéros de série concernés, 1 page

Oxylog 2000 plus	
Référence produit : 5705080	
Numéros de série	
ASEJ-0015	ASEK-0001
ASEJ-0016	ASEK-0002
ASEJ-0019	ASEK-0003
ASEJ-0020	ASEK-0004
ASEJ-0021	ASEK-0005
ASEJ-0022	ASEK-0006
ASEJ-0023	ASEK-0007
ASEJ-0024	ASEK-0008
ASEJ-0025	ASEK-0009
ASEJ-0026	ASEK-0010
ASEJ-0027	ASEK-0011
ASEJ-0028	ASEK-0012
ASEJ-0029	ASEK-0016
ASEJ-0030	ASEK-0017
ASEJ-0031	ASEK-0018
ASEJ-0033	ASEK-0019
ASEJ-0034	ASEK-0021
ASEJ-0035	ASEK-0022
ASEJ-0036	ASEK-0023
ASEJ-0037	
ASEJ-0038	
ASEJ-0039	
ASEJ-0040	

Oxylog 3000 plus	
Référence produit : 5704833	
Numéros de série	
ASEJ-0107	ASEK-0002
ASEJ-0108	ASEK-0003
ASEJ-0109	ASEK-0004
ASEJ-0110	ASEK-0005
ASEJ-0111	ASEK-0006
ASEJ-0112	ASEK-0007
ASEJ-0113	ASEK-0008
ASEJ-0114	ASEK-0009
ASEJ-0115	ASEK-0010
ASEJ-0116	ASEK-0011
ASEJ-0117	ASEK-0012
ASEJ-0118	ASEK-0013
ASEJ-0119	ASEK-0014
ASEJ-0120	ASEK-0015
ASEJ-0121	ASEK-0016
ASEJ-0122	ASEK-0017
ASEJ-0123	ASEK-0018
ASEJ-0124	ASEK-0019
ASEJ-0125	ASEK-0020
ASEJ-0126	ASEK-0021
ASEJ-0127	ASEK-0022
ASEJ-0128	ASEK-0023
ASEJ-0129	ASEK-0026
ASEJ-0130	ASEK-0029
ASEJ-0131	
ASEJ-0132	
ASEJ-0133	
ASEJ-0134	
ASEJ-0135	
ASEJ-0136	
ASEJ-0137	
ASEJ-0138	
ASEJ-0139	
ASEJ-0140	
ASEJ-0140	