

## Pour une utilisation sécurisée des barrières de lit

### Questions/Réponses

#### Les barrières de lit empêchent-elles le patient de tomber?

Les barrières sont conçues pour éviter la chute des patients pendant leur sommeil et leur transport **MAIS** ne sont pas conçues pour empêcher un patient de sortir volontairement de son lit

#### Les barrières de lit sont-elles bénéfiques pour le patient?

Les barrières sécurisent le patient **MAIS** elles peuvent représenter un danger : chute après tentative d'enjambement, blessure ou asphyxie suite au piégeage d'un membre, de la tête ou du thorax.


=> *Évaluer le bénéfice / risque de l'utilisation des barrières de lit, selon les capacités de surveillance et l'état physique et mental du patient*

#### Les barrières permettent-elles de limiter la surveillance?

Aucun moyen technique ne remplace la surveillance du patient. Une surveillance particulière est nécessaire pour les personnes agitées, non valides, non lucides. Une surveillance régulière permet d'intervenir rapidement en cas de piégeage. Une surveillance régulière permet de répondre aux besoins du patient et ainsi limiter ses raisons de vouloir sortir de son lit

#### Matériorivigilance

Déclarer, par l'intermédiaire du correspondant de matériorivigilance de l'établissement, en joignant le questionnaire barrière de lit disponible sur le site Internet ([www.afssaps.sante.fr](http://www.afssaps.sante.fr)), tout incident ou tout risque d'incident sur les barrières de lits médicaux à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – département des vigilances – Fax : 01.55.87.37.02.

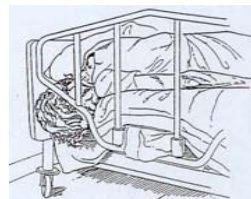

Entre la tête de lit et la barrière




Entre le matelas et la barrière

#### Quelles sont les zones dangereuses de la barrière?

Tous les espaces entre le lit, le matelas et les barrières sont potentiellement dangereux. Les principales zones à risque de piégeage sont représentées dans les schémas ci-contre. Des normes définissent des dimensions sécuritaires pour ces zones.



Entre les barreaux

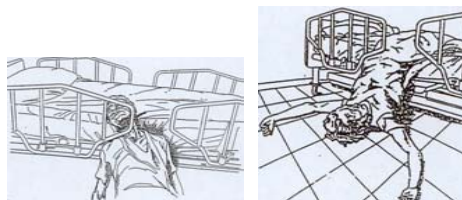

Entre les 2 demi-barrières

#### Mes gestes de soignant sont-ils sécuritaires?

- Mettre le lit en position basse en dehors des soins réduit les risques en cas de chute.
- Vérifier le verrouillage des barrières et leur fixation au cadre du lit à chaque utilisation prévient les risques de détachement de la barrière.
- Se conformer aux instructions données par le fabricant de la barrière.
- Signaler aux services de maintenance tout dysfonctionnement ou pièce suspecte.

#### Puis-je manipuler les barrières sans formation?

Une barrière mal fixée ou inadaptée au lit peut présenter des risques. Il est important que toutes les personnes manipulant les barrières aient reçu une formation adéquate.

#### Les matelas/ Les barrières sont-ils compatibles avec tous les lits?

- Chaque barrière est compatible avec seulement un (ou quelques) modèle(s) de lit.
- En cas de changement de matelas ou utilisation d'un sur-matelas ou matelas thérapeutique, le fabricant du lit vous indiquera les dimensions adéquates (notamment pour ne pas diminuer la hauteur relative des barrières)